

**ОПИСАНИЕ:** Пластырь–ингалятор медицинский «Дыши» представляет собой полоску прямоугольной формы с закругленными углами и без них, из нетканого материала прямоугольной формы с закругленными углами с защитным покрытием. На полоску нанесена клейкая масса с эфирными маслами.

**НАЗНАЧЕНИЕ:** Пластырь–ингалятор «Дыши» предназначен для ингаляций, клеящийся на одежду. Эфирные масла, испаряющиеся в процессе применения пластыря, способствуют:

- профилактике простудных заболеваний, облегчению их симптомов,
- нормализации дыхания при заложенности носа, облегчению засыпания.

### ПРИНЦИП РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ:

Пластырь–ингалятор медицинский «Дыши» содержит натуральные эфирные масла, которые:

- обладают противовирусным, антибактериальным, противовоспалительным, болеутоляющим и тонизирующим действием,
- применяются для профилактики простудных заболеваний и в качестве симптоматического средства в составе комплексной терапии ОРВИ.

После удаления защитного покрытия эфирные масла испаряются с поверхности пластыря.

**Эфирные масла уничтожают патологические микроорганизмы, находящиеся в воздухе, за счет чего снижается риск попадания их в организм.**

Действие пластыря обусловлено действием эфирных масел, входящих в его состав.

### СОДЕРЖИТ:



**масло мятное без ментола**  
(Oleum Menthae)



**масло эвкалиптовое**  
(Oleum Eucalypti)



**пихтовое масло**  
(Oleum Abiesis)



**левоментол**  
(Levomenthol)



**лавандовое масло**  
(Oleum Lavandulae)



**терпентиновое масло**  
(Oleum Terebinthinae)

### СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Только для наружного применения.



1 Пластырь вынуть из упаковки.



2 Снять защитное покрытие.



3 Наклеить липкой стороной на одежду в районе верхней части грудной клетки.

С профилактической целью пластырь «Дыши» может применяться в период повышенного риска простудных заболеваний.



4 Для профилактики заражения ОРВИ и другими простудными заболеваниями необходимо наклеить пластырь на верхнюю одежду во время нахождения в общественных местах или транспорте.



5 Также можно наклеить пластырь–ингалятор медицинский «Дыши» на любую сухую поверхность, которая находится вблизи вас или ребенка (стена рядом с кроватью, стол на рабочем месте и т. д.).

Пластырь предназначен для однократного применения.

**! Один пластырь действует до 8 часов.**

[maslo-dishi.ru](http://maslo-dishi.ru)

### ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:



Индивидуальная непереносимость отдельных компонентов.



Детский возраст до 2 лет.

### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:




! Только для наружного применения.



! Не наклеивать пластырь на кожу.



! Избегать контакта пластыря с глазами, со слизистыми оболочками и поврежденными участками кожных покровов.

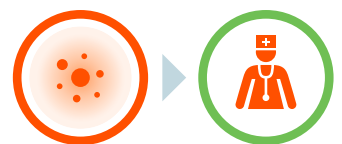

! При возникновении аллергической реакции следует немедленно прекратить использование пластыря и проконсультироваться с врачом.



! Перед применением пластыря детьми до 2 лет, беременными или кормящими женщинами необходимо проконсультироваться с врачом.



! Не применять лицам с повышенной чувствительностью к компонентам пластыря.



! Не использовать пластырь, если нарушена целостность упаковки.

**ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:** терапия, оториноларингология.

**УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ:** применяется в стационарных и амбулаторных лечебно–профилактических медицинских учреждениях и в домашних условиях.

**ВОЗМОЖНЫЕ ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ:** Не использовать людям, склонным к аллергическим реакциям.

**РАЗМЕР:** 50 x 60 мм.

**УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:** **25°** при температуре не выше 25 °С.



при относительной влажности 45–80 %.



в недоступном для детей месте.

**Пластырь–ингалятор медицинский «Дыши»** по ТУ 9393–001–58693373–2014.

**Срок годности:** 3 года с даты изготовления.

**Утилизация:** использованный пластырь относится к отходам класса А и утилизируется в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790–10. РУ № РЗН 2014/2246 от 08.08.2018 г.

**Место производства:** АО «Верофарм», РФ, 394006, г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 80.

**Предприятие–производитель:** АО «АКВИОН», РФ, 125040, г. Москва, 3–я ул. Ямского поля, д. 28, пом. I, комн. 27.  
Тел./факс: +7 (495) 780–72–34, [akvion.ru](http://akvion.ru).

**Телефон горячей линии:** 8–800–200–86–86 (с 9.00 до 18.00, в будни).

